
## Spiegazione dei simboli

#### Simbolo Significato

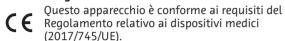



Produttore



Attenersi alle istruzioni per l'uso



Data di scadenza



Numero di serie del dispositivo



Dispositivo Medico




Identificatore unico del dispositivo





Importatore





Indica che il materiale di imballaggio è cartone di fibra non ondulato (cartone)

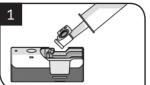


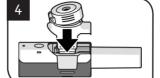

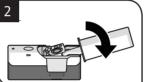

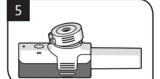

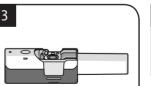

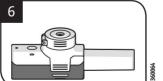





# Confezione mensile

Istruzioni per l'uso



## Vectura Group Ltd

One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH, Reano Unito



#### www.vectura.com **Vectura Ireland Limited**

Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre Newtownmountkennedy Co. Wicklow, A63 XV26





DAW-10009-02 510009R2 280923

20.12.2023 14:42:09

90360064 03.indd

#### Avvertenza

► La Confezione mensile Breelib™ è un accessorio del sistema di inalazione Breelih™. Prima di utilizzare questo dispositivo leggere per intero le istruzioni per l'uso del sistema di inalazione Breelib™. Solo leggendo le istruzioni per l'uso del sistema di inalazione Breelih™ si potrà ottenere un

funzionamento

corretto e sicuro.

Non usare il Breelih™ se danneggiato o modificato. Utilizzare soltanto accessori forniti da un centro di

assistenza autorizzato.

- ▶ Il Breelib™ può essere riparato esclusivamente da Vectura Group Ltd o da un centro di assistenza autorizzato da Vectura Group Ltd. Vectura Group Ltd non sarà responsabile di nessun danno o malfunzionamento derivante da riparazioni non autorizzate.
- ▶ Non condividere il proprio Breelib™ con

altre persone poiché potrebbero derivarne infezioni. Il Breelih™ è destinato all'uso su un solo paziente.

▶ Prima dell'uso. verificare che il Breelib™ sia stato correttamente pulito in conformità con le istruzioni del sistema

#### Prudenza

▶ Per garantire prestazioni costanti. non utilizzare i componenti della Confezione mensile per oltre un mese.

di inalazione Breelib™.

### 2. Contenuto della confezione

- ► Istruzioni per l'uso (il presente documento)
- ▶ Boccaglio
- ▶ Nebulizzatore

## 3. Destinazione d'uso La Confezione mensile

Breelib™ è un accessorio del sistema di inalazione Breelib™. La Confezione mensile Breelib™ può essere utilizzata esclusivamente con il sistema di inalazione Breelih™. Per informazioni relative all'uso previsto, per

istruzioni generali e per la

descrizione del dispositivo,

consultare le istruzioni per l'uso del sistema di inalazione

### 4. Conservazione e trasporto

Non sono previste condizioni particolari di conservazione e trasporto della Confezione mensile Breelib™.

# 5. Vita utile

Confezione mensile

I componenti della Confezione mensile Breelib™ sono destinati ad essere utilizzati più volte. La vita utile della

Breelih™ è limitata a un mese.

#### 6. Smaltimento

I componenti della Confezione mensile possono essere smaltiti come normali rifiuti domestici.

90360064 03.indd 2