

Explicación de los símbolos

Símbolo Significado

El dispositivo cumple los requisitos de la normativa sobre dispositivos médicos (2017/745/UE)

Fabricante

Siga las instrucciones de uso

Fecha de vencimiento


Número de serie

Este símbolo indica que se trata de un dispositivo médico.

Identificador único del producto

Importador

Indica que el material de envasado es tablero de fibra no ondulado (cartón simple).

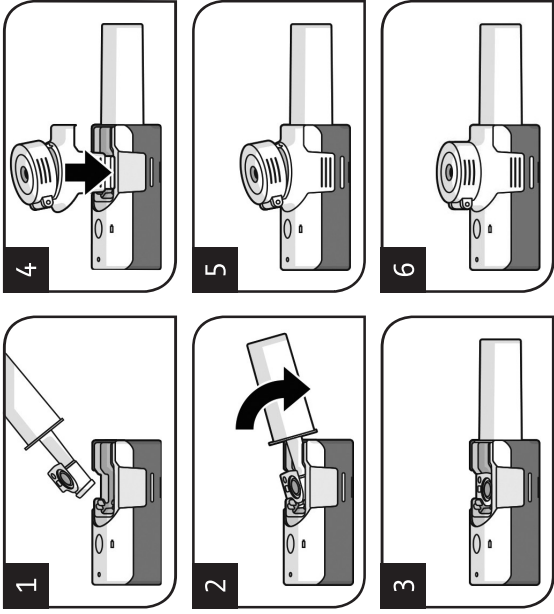

Breelib™
Paquete mensual
Instrucciones de uso



Vectura Group Ltd
One Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH,
Reino Unido
www.vectura.com
Vectura Ireland Limited
Block 2, Newtown Business and Enterprise Centre
Newtownmountkenedy
Co. Wicklow, A63 XV26
Irlanda

DAW-10019-01
510019R1
150524



1. Información sobre la seguridad



Advertencia

► El paquete mensual *Breelib™* es un accesorio para el sistema de inhalación *Breelib™*. Lea completamente las instrucciones de uso del sistema de inhalación *Breelib™* antes de usar el dispositivo. Únicamente puede lograrse un funcionamiento correcto y seguro si se siguen las instrucciones de uso

del sistema de inhalación *Breelib™*.

► No use el sistema *Breelib™* si está dañado o ha sido modificado. Utilice únicamente accesorios suministrados por un proveedor de servicio autorizado.

► Únicamente Vectura Group Ltd o un proveedor de servicio autorizado por Vectura Group Ltd tiene permitido reparar el *Breelib™*. Vectura Group Ltd no es responsable de daño alguno o mal

funcionamiento resultante de una reparación no autorizada.

► No comparta su *Breelib™* con otras personas, ya que esto puede causar infecciones. El *Breelib™* está ideado para su uso por un solo paciente.

► Asegúrese de que el *Breelib™* haya sido limpiado y desinfectado correctamente antes de usarlo, de acuerdo con las instrucciones de uso del sistema de inhalación *Breelib™*.

Atención

► Para mantener un desempeño constante, no use los componentes del paquete mensual durante más de un mes.

2. Contenido del paquete

► Instrucciones de uso (este documento)

► Boquilla

► Unidad nebulizadora

3. Uso previsto

El paquete mensual *Breelib™* es un accesorio para el sistema de

inhalación *Breelib™*. El paquete mensual *Breelib™* puede utilizarse únicamente en combinación con el sistema de inhalación *Breelib™*. Consulte más información respecto al uso previsto, las instrucciones generales y la descripción del dispositivo en las instrucciones de uso de su sistema de inhalación *Breelib™*.

4. Almacenaje y transporte

No se definen condiciones específicas de almacenaje y transporte del paquete mensual *Breelib™*.

5. Vida útil

Los componentes del paquete mensual *Breelib™* están ideados para un uso repetido. La vida útil del paquete mensual *Breelib™* se limita a un mes.

6. Eliminación

Los componentes del paquete mensual se pueden desechar junto con la basura doméstica normal.

90984726
Bayer